


Medtronic Reservoir Paradigm®



Руководство пользователя

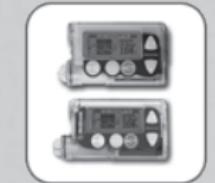

Показания к применению

Этот резервуар предназначен для подкожной инфузии лекарственных препаратов, в том числе инсулина из инфузионной помпы и инфузионного набора Paradigm корпорации Medtronic. Резервуар емкостью 1,8 мл (180 ед. инсулина U-100) предназначен для использования с инфузионной помпой Paradigm 5 или 7-й серии. Резервуар емкостью 3,0 мл (300 ед. инсулина U-100) предназначен для использования только с инфузионной помпой Paradigm 7-й серии.

Противопоказания

Запрещается использовать данный резервуар для инфузии крови или препаратов крови.

Предостережения

Резервуар и ограничитель хода поршня являются стерильными, апирогенными и предназначены только для одноразового использования.

Не очищайте и не стерилизуйте повторно.

Повторное использование резервуара может привести к разрушению инсулина, инфицированию, неточному введению препарата и/или протечкам, которые могут повредить помпу.

Не использовать, если упаковка открыта или повреждена.

Аккуратно поместите ограничитель хода поршня в контейнер для острых предметов. Отказ от удаления остаточного воздуха из резервуара может привести к неточному введению препарата.

Меры предосторожности

Перед заполнением резервуара инсулин должен иметь комнатную температуру. Использовать резервуар по назначению сразу после заполнения. Не хранить! После замены резервуара и инфузионного набора проверьте их герметичность. Первые установки выполняйте под контролем лечащего врача.

Гарантия

Посетите <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.

Сведения об установке и заправке см. в руководствах пользователя помпой и инфузионным набором.

