

Показания к применению

Устройство Sil-serter применяется в качестве инструмента для облегчения введения инфузионных наборов семейства Silhouette® корпорации Medtronic.

Противопоказания

Устройство Sil-serter предназначено для применения только с инфузионными наборами семейства Silhouette. Корпорация Medtronic MiniMed не гарантирует безопасность и/или эффективность работы при использовании данного устройства с другими инфузионными наборами.

Предостережения

В случае если инфузионный набор перед введением не был надежно закреплен в устройстве для введения, с иглой, направленной прямо вперед, это может причинить боль или нанести травму. Никогда не направляйте устройство для введения во взведенном состоянии на те участки тела, в которые не планируется введение.

Перед введением обязательно прочтите в руководстве пользователя к инфузионному набору информацию о необходимой подготовке места для инфузии.

Не соблюдая инструкции, можно причинить боль и нанести травму.

Перед введением удостоверьтесь, что защита иглы инфузионного набора удалена. Техническое обслуживание: Очистите устройство для введения мыльным раствором с использованием жидкого моющего средства или хозяйственного мыла. Промойте чистой водой. Подождите, пока устройство не высохнет.

Чтобы сохранить оптимальную эффективность и продлить срок службы, храните устройство для введения в невзведенном состоянии.

Это устройство предназначено для использования для одного пациента и не предназначено для использования несколькими пациентами.

2

